



# 抗原検査キットの使い方 How to use COV-19 Antigen Detection kit

使うもの

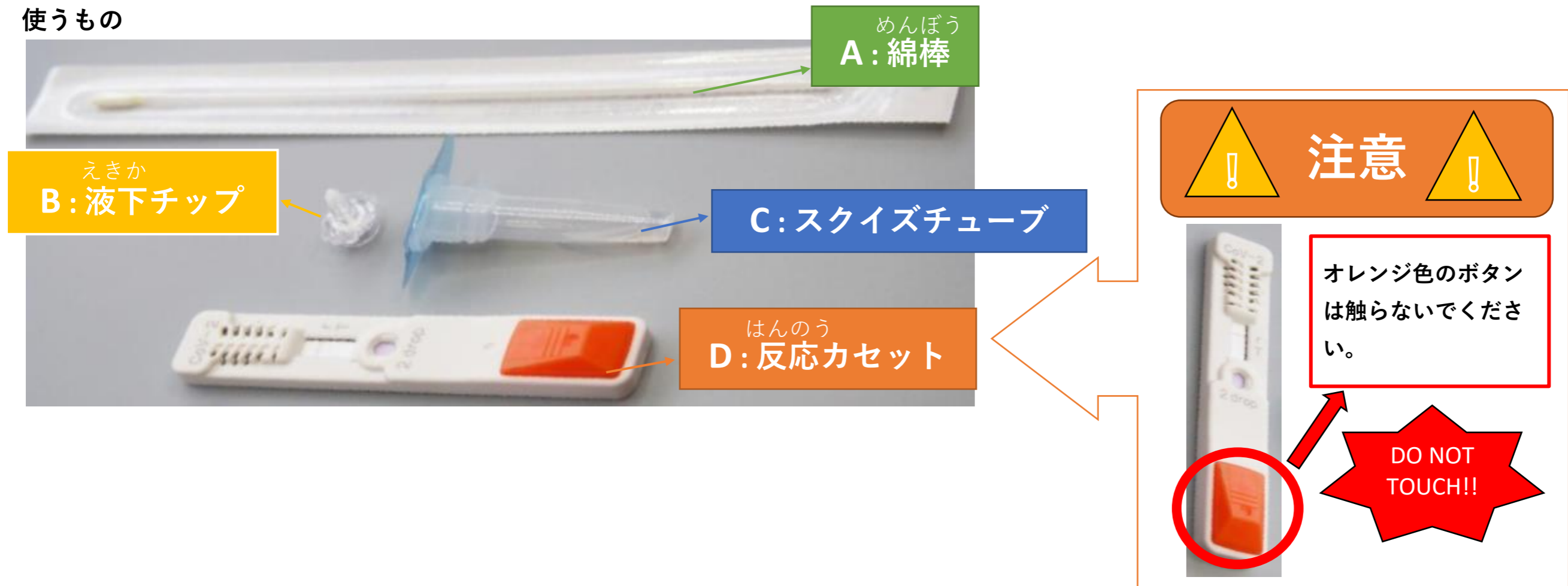

準備：【鼻の中の水を取ります】綿棒（A）を鼻に約2cm入れ、5回回転させて、そのまま5秒間鼻の奥にキープする。

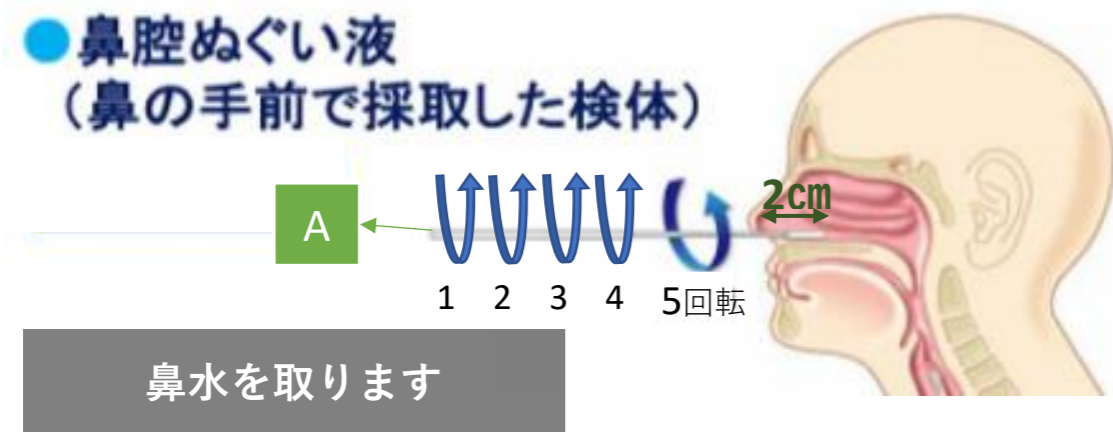

Aを鼻の中に2cm入れて、  
5回鼻の中で回す。  
5秒間動かさないうでキープ  
↓  
鼻からゆっくりAを取り出す



青色のシートを取ります



青いフィルムシートを取って、中の液（えき）がこぼれないようにする。

### 1.検体抽出

検体を採取した綿棒の綿球部分をすみやかにスクイズチューブ内の検体処理液に浸し、綿球部分を挟み押さえながら10回程度回転、その後綿球部分を絞り出しながら綿棒を取り出します。

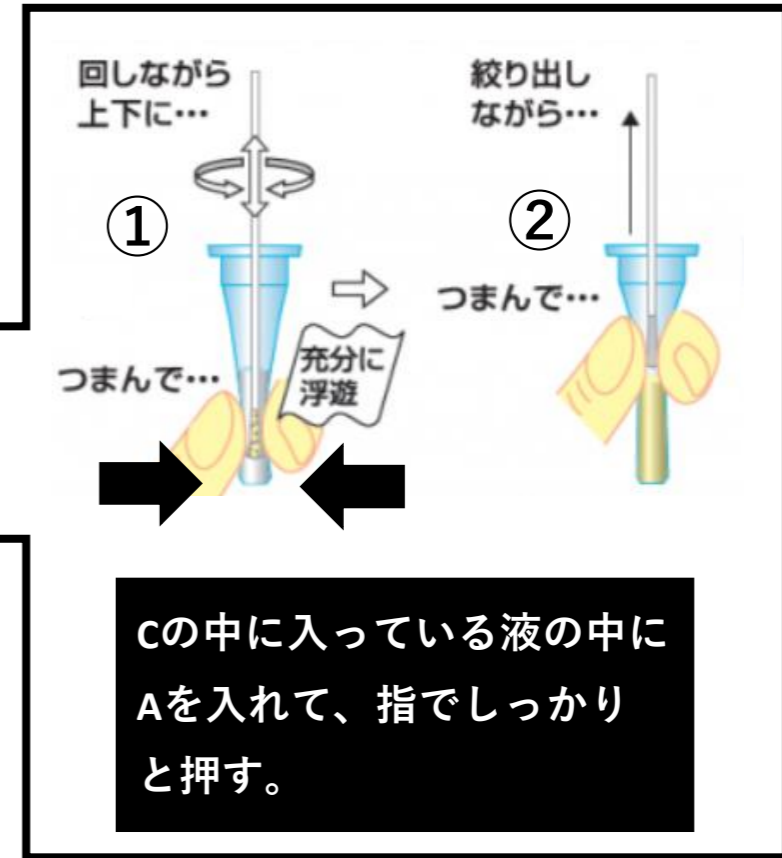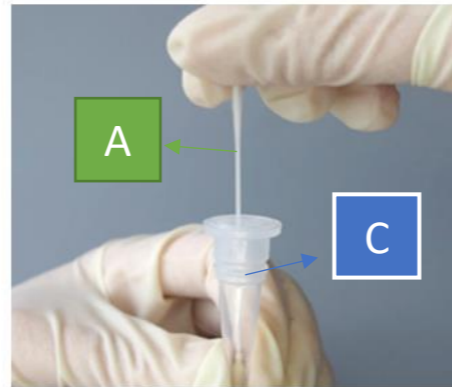

Cの中に入っている液の中にAを入れて、指でしっかりと押す。

### 1.準備した鼻水を検査の液に入れる

Aを使って鼻の中から鼻水を取った後、すぐにAをCの中に入れて指でつまみながら10回回して、Aは捨てます。

### 2.滴下チップをはめる

調製した試料液の入ったスクイズチューブに滴下チップをはめ込み、5分静置します。



### 2.CにBをつける

CにBをつけて、5分間動かさないうで置いておきます。  
(中の液がこぼれないようにしてください)




### 3.滴下

試料液を紫色の検体滴下部**2滴**滴下します。  
(\*反応カセットと滴下チップの先端を**10mm**以上離して、滴下ください)

#### 3.Dに液を入れる

Dの穴(○)にBから液を入れます。  
その時、BとDの間は**1cm**開けてください。  
液は**2滴**だけ入れてください。(たくさん入れないでください)

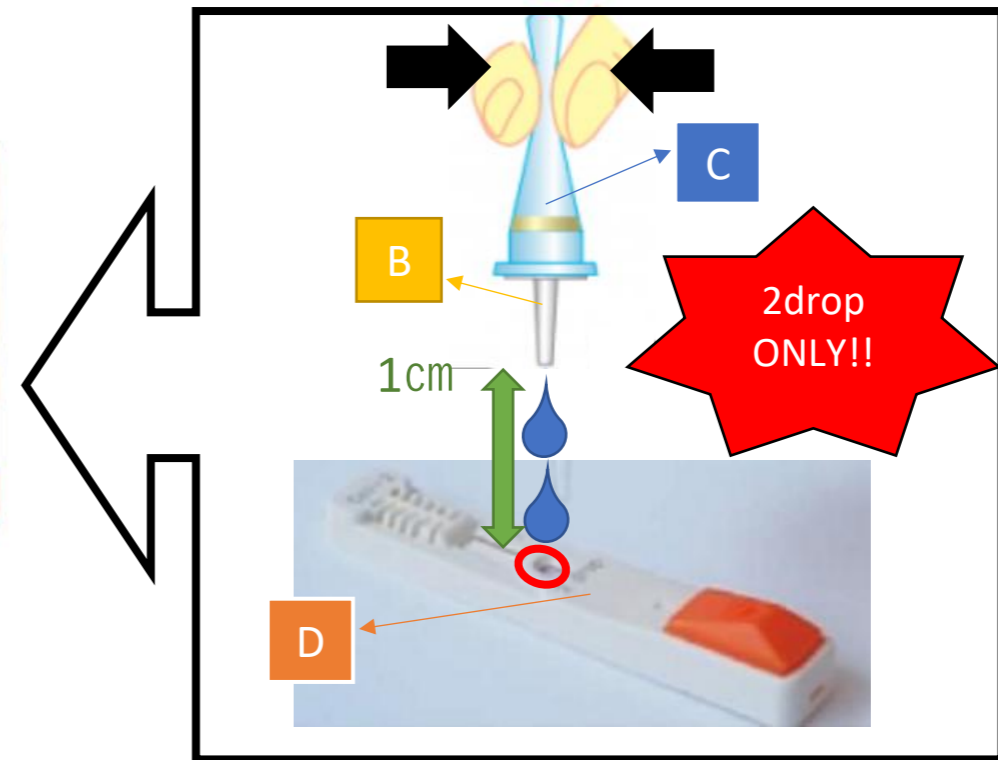


### 4.押す

試料液滴下後、すみやかにオレンジ色の**凸部**を押し、反応を開始し、30分間水平に静置します。  
反応開始後は判定部に直接風が当たらないようにしてください。

#### 4.Dのオレンジ色のボタンを押す

Bから液を入れた後、Dのオレンジ色のボタンを指で押します。

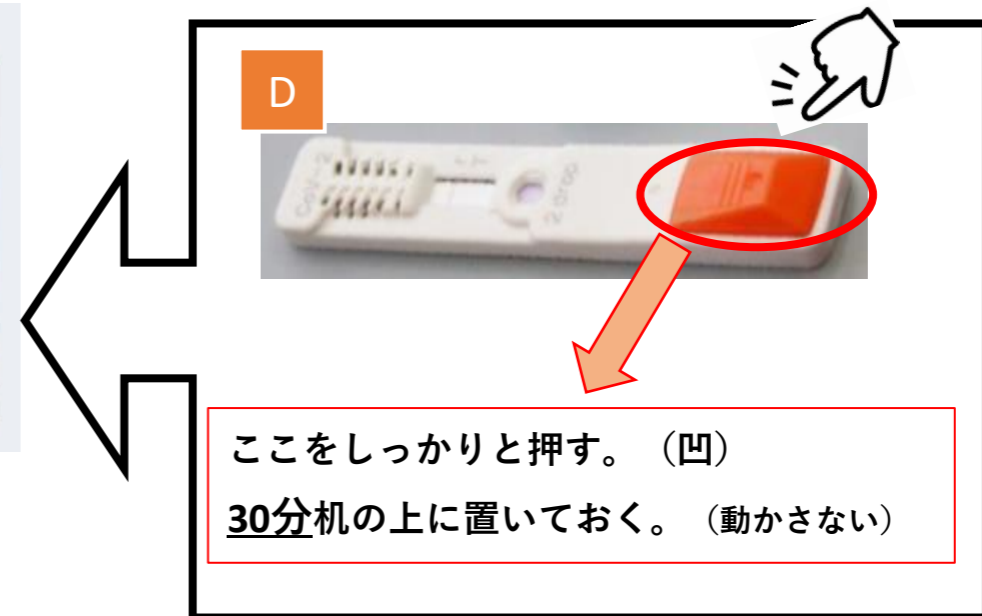

ここをしっかりと押す。(凹)  
**30分**机の上に置いておく。(動かさない)

### 5.反応時間


30分後に判定を行います。ただし、30分より前でもレファレンスラインと判定ラインが出現した場合、「陽性」と判定できます。

#### 5.30分待つ

Dを机の上に置いて**30分**触らないでください。



★結果（けっか）の確認（かくにん）

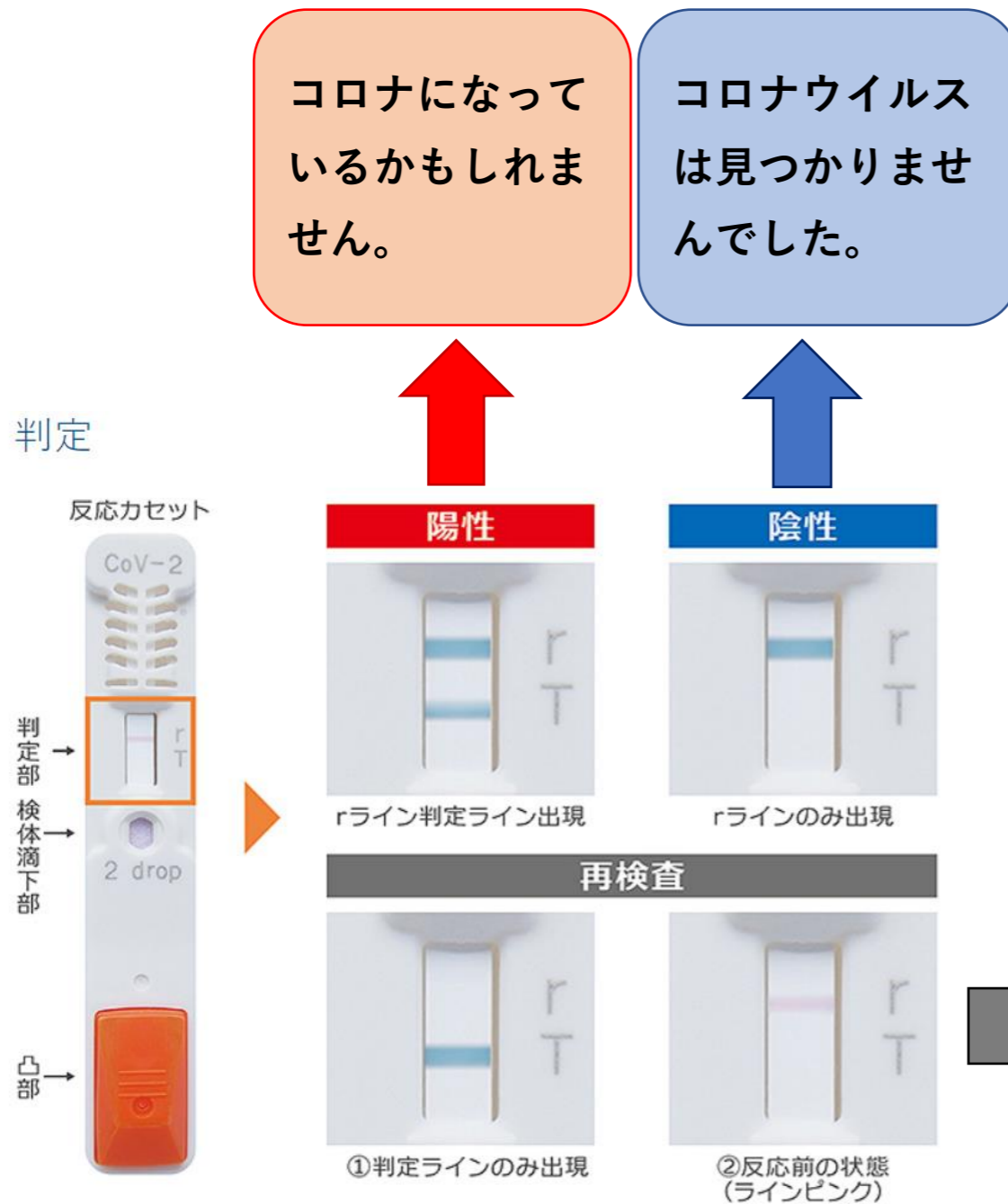

コロナになっている  
かもしれません。

コロナウイルス  
は見つかりませ  
ませんでした。

結果を確認して、必ず先生とお話しをしましょう。

先生とお話しするときは、下の5つのことを教えてください。

1. いつから体調（たいちょう）が悪いですか？
2. いま、熱（ねつ）は何度（なんど）ありますか？
3. 熱がたくさんでたのはいつですか？
4. 一緒（いっしょ）に住んでいる人はいますか？
5. 最近（さいきん）一緒にごはんを食べた人はいますか？
6. 最近（さいきん）パーティーをしましたか？

もう一度確認しなければい  
けません。

- 本品は30分で判定を実施してください。ただし、30分より前でもレファレンスラインと判定ラインが出現した場合、「陽性」と判定できます。また、30分判定時点では「陰性」でその後「陽性」となった場合は「陰性」と判定してください。
- 判定ラインの発色および赤いラインの消失の有無にかかわらず、青色のレファレンスラインが認められなかった場合（再検査(1)）、および赤いラインが消失しなかった場合（再検査(2)）は、新しい反応カセットを用いて再検査を行ってください。